

# 測定の手引き

測定の前に  
情報の入力  
(質問への回答)

はかる前に

測定準備  
測定開始  
測定中  
測定完了

測定方法

測定結果の見方

結果

## 測定の前に

- 1 測定はきき腕のちからコブの位置で行います。洋服をめくって測定できるように準備をしてください。ジャケット等を着ている場合は、あらかじめ脱いでおいてください。



## 情報の入力

- 1 測定開始ボタンを押して測定をスタートします。
- 2 測定者情報の入力します。上から順番に、性別、年齢、体重、身長をタッチパネルを使って入力してください。



※入力を間違えた場合は、「戻る」ボタンを押すと選択している入力欄が空欄になります。

## 質問への回答 (オプション)


- 1 もし、画面上に質問項目が表示されたら、あてはまる質問に「はい」ボタンで回答してください。



裏面へ

## 測定準備

- 1 画面に従って、測定の準備をします。  
プローブを遮光プレートの銀色の目印ラインに合わせてはめ込みます。その際、遮光プレートの反対側に4～5ミリはみ出すようにします。
- 2 血圧を測る時の要領で、測定する側の腕を、手のひらを上にして置きます。
- 3 遮光プレートを引き腕のちからコブの位置に合わせます。その際（平らな方を）腕の関節部に遮光プレートの下側を合わせるようにします。

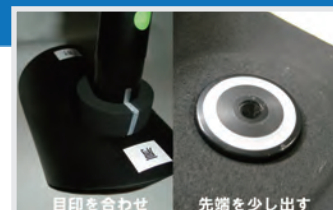

## 測定開始

- 1 測定の準備が完了したら「準備完了」ボタンを押して測定を開始します。



## 測定中

- 1 測定は2回行います。準備ができたらプローブの緑色ボタンを押してください。そして画面が切り替わったら、もう一度ボタンを押してください。



## 測定完了

- 1 これで測定が完了しました。  
測定結果を印刷したい場合は「印刷」ボタンを。  
もう一度測定したい場合は、「もう一度測定する」ボタンを押してください。

